

Όνομα προϊόντος:

Ora Aid - Ενδοστοματικός επίδεσμος πληγών

Προορισμός:

Χρησιμοποιείται για την προστασία του στοματικού τραύματος

σχηματίζοντας ένα φυσικό φράγμα στο τραύμα

Χαρακτηριστικά & οφέλη (Χαρακτηριστικό απόδοσης)

Αυτό το προϊόν είναι προστατευτικό υλικό επίδεσμου χωρίς ευγενόλη που εφαρμόζεται σε ενδοστοματικά τραύματα

1. Προστατεύει το στοματικό τραύμα
2. Μειώνει τον πόνο που προκαλείται από ερεθισμό του στοματικού τραύματος
3. Πρόσφυση με χρήση υδρόφιλου πολυμερούς
4. Αυτοκόλλητο με σάλιο

Ενδείξεις χρήσης:

Ο ενδοστοματικός επίδεσμος τραύματος προορίζεται για τη διαχείριση όλων των τύπων στοματικών τραυμάτων, τραυματισμών και εξελκώσεις του βλεννογόνου των ούλων και του στόματος, συμπεριλαμβανομένης της στοματίτιδας, της μικρής φθοράς και των τραυματικών ελκών, εκδορές που προκαλούνται από σιδεράκια και οδοντοστοιχίες που δεν εφαρμόζουν σωστά και βλάβες που σχετίζονται με στοματική χειρουργική.

Το “Wound Dressing” λειτουργεί για την ανακούφιση του πόνου προσκολλώντας και προστατεύοντας τους προσβεβλημένους ιστούς από περαιτέρω ερεθισμό, επιτρέποντας έτσι την επούλωση.

Τρόπος χρήσης:

•Ετοιμασία

1. Ελέγξτε τη μόλυνση του προϊόντος, τη ζημιά στη συσκευασία και την ημερομηνία λήξης
2. Διαβάστε προσεκτικά το οδηγίες πριν από τη χρήση (Ορισμένες φυσαλίδες στο προϊόν προέρχονται από τη διαδικασία κατασκευής και είναι ασφαλείς) •

Οδηγίες:

1. Ενυδατώνετε το τραύμα με ορό

2. Κόψτε το προϊόν σε σωστό σχήμα και μέγεθος
3. Αφαιρέστε ελαφρά την υγρασία με γάζα στο τραύμα. Μια υπερβολική εξίδρωση μπορεί να μειώσει τη συγκολλητική του αντοχή και το χρόνο χρήσης του
4. Αφαιρέστε το διαφανές χαρτί απελευθέρωσης και εφαρμόστε στο τραύμα
5. Πιέστε απαλά το προϊόν για 5 έως 10 δευτερόλεπτα ενώ το προϊόν προσκολλάται στο τραύμα (Ανάλογα με τις περιστάσεις, πατήστε επανειλημμένα)

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ :

1. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το προϊόν φαίνεται κατεστραμμένο ή μολυσμένο πριν από τη χρήση
2. Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 12 ετών

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Αυτή η ιατρική συσκευή προορίζεται για μία χρήση. Εάν επαναχρησιμοποιηθεί, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη, διασταυρούμενη μόλυνση και φλεγμονή. Το προϊόν αυτό πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τον κανονισμό διάθεσης κάθε αρμόδιας αρχής.

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση
 2. Εάν εμφανίσετε οίδημα, αλλεργική αντίδραση, στομαχικές διαταραχές ή οποιαδήποτε σημεία λοίμωξης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας
 3. Δεν συνιστάται η αφαίρεση του εμπλάστρου με δύναμη, η συγκολλητική πλευρά θα διαλυθεί και θα πέσει μόνη της.
 4. Η προστατευτική πλευρά που χωρίζεται από το τραύμα μπορεί να φτύσει
 5. Ο χρόνος προσάρτησης μπορεί να μειωθεί όταν διεγείρεται από τη γλώσσα ή τα τρόφιμα
- Ειδοποίηση προς τον χρήστη και/ή τον ασθενή ότι κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή

του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Αποθήκευση:

1. Φυλάσσετε σε εσωτερικούς χώρους (1°C~35°C) σε καθαρό μέρος
2. Αποφύγετε τη φωτιά, το άμεσο ηλιακό φως και το περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας
3. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά


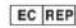
• Αυτό το προϊόν μπορεί να σκληρύνει από τη μέθοδο αποθήκευσης και διαχείρισης • Ορισμένες φυσαλίδες στην επιφάνεια της ταινίας προέρχονται από τη διαδικασία κατασκευής και είναι ασφαλείς

Εφαρμόσιμο προφίλ ασθενούς:

Ασθενείς που χρειάζονται επίδεσμο για την προστασία των στοματικών τραυμάτων.

Χρήστης συσκευής:




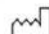


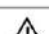
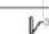

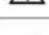




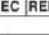


Επαγγελματίας υγείας

 TBM Corporation B-301, 313, Cheomdangwagi-ro, Buk-gu, Gwangju, 61008, Korea Tel:+82-62-971-2845 Fax:+82-62-971-2815
website:www.tbmkorea.com (User manual can be downloaded from the homepage.)
 KTR Europe GmbH | Mergenthalerallee 77 , 65760 Eschborn, Germany

Model Number OB23, OB53, AD12

* This product shall be disposed according to disposal regulation of each Competent Authorities.

Symbol Description

	Model Number		Lot number		Manufacturer
	Date of manufacture		Use by		Do not reuse
	Caution		Storage and Transport Temperature limit		Keep away from sunlight
	Consult instructions for use		Do not use if package is damaged		Authorized representative in the European community
	CE mark		Certificate of GMP		Unique Device Identifier
	Medical Device		A doctor's prescription only		