



+ADM-1st Choice Medicals
smart & quality solutions at a reasonable price

Ora-Aid
A New Conceptual Periodontal Wound Dressing

Ora-Aid σε συνδυασμό με εμφυτεύματα:

- Εφαρμόζοντας την Ora-Aid αμέσως μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος:
Αν και δεν παραμένει για παρατεταμένη χρονική περίοδο χωρίς ράμματα, ακόμη και 2-3 ώρες προστασίας της πληγής μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης από τον πόνο και των αιμοστατικών επιδράσεων.
- Επιπλέον, υπάρχει μια αξιοσημείωτη διαφορά στα αποτελέσματα όταν δαγκώνουμε τη γάζα πάνω από την Ora-Aid, σε σύγκριση με τη γάζα μόνη της, μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος.
- Όταν το εμφύτευμα δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο κολόβωμα:
Εφαρμόστε την Ora-Aid μετά την ραφή, τοποθετώντας στη συνέχεια μια γάζα.
- Όταν το εμφύτευμα είναι συνδεδεμένο με κάποιο κολόβωμα:
Εφαρμόστε την Ora-Aid μετά την προετοιμασία μιας τρύπας για το κολόβωμα ή κόβοντάς την σε σχήμα σταυρού.
- Είναι επίσης δυνατό να εφαρμόσετε την περιοδοντική χειρουργική κονία πάνω από την Ora-Aid χωρίς ράμματα.

Ora-Aid

**"Αξιόπιστη για τους γιατρούς για την αξιοσημείωτη αιμόσταση και την υποστήριξη
επούλωσης και αγαπητή από τους ασθενείς για την απίστευτη ανακούφιση από
τον πόνο."**

 Web: <https://www.fcm.com.gr/>

 E mail: info@fcm.com.gr

 Tel.: +30 211 42 13 059

 Cyprus: +357 97740827